

Termómetro sin contacto FT-100B

El termómetro sin contacto FT-100B de Yasee ofrece una medición precisa y rápida en solo 1 segundo, ideal para uso clínico, hospitalario y domiciliario.

Su diseño ergonómico permite tomar la temperatura corporal sin contacto directo, evitando riesgos de contaminación cruzada.

La pantalla LCD con luz de fondo facilita la lectura incluso en entornos con poca iluminación, y el sistema de semáforo de tres colores (verde, ámbar y rojo) muestra de forma visual el nivel de temperatura.

Incluye alarma sonora para fiebre alta, apagado automático tras 30 segundos sin uso y posibilidad de medir tanto en °C como en °F.

Características principales

Tipo: Termómetro infrarrojo digital sin contacto

Rango de temperatura: 32.0°C ~ 42.9°C

Resolución: 0.1°C

Medición rápida: resultado en 1 segundo

Sensor de alta precisión

Pantalla LCD con luz de fondo

Medición en °C y °F

Apagado automático: después de 30 segundos

Alarma sonora para fiebre alta

Indicador de batería baja

Semáforo tricolor: verde, ámbar y rojo



Forma de uso

Coloque el termómetro a 1,5 – 5 cm de la frente.

Presione el botón de medición.

Lea el resultado en la pantalla LCD.

Interprete el color del semáforo:

■ Verde: temperatura normal.

■ Ámbar: temperatura media.

■ Rojo: fiebre alta.